

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie beschreibt das Anlegen einer FFP2 oder FFP3-Mund-Nasenschutzmaske.

2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)
- Stellungnahme des RKI „Mögliche Maßnahmen zum Ressourcen-schonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Erkrankung COVID-19“. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html
- Videoanleitung des KAV „Video Hygienemaßnahmen“ im AKH-Intranet - Coronavirus

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
FÄ	Fachärztin
KL	Klinikleitung
e.h.	eigenhändig
HFK	Hygienefachkraft
exp.	expiratorisch
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
RL	Richtlinie
QB	Qualitätsbeauftragte/r


	Funktion	Name oT	Datum	Unterschrift
Erstellt	FÄ	Ebner	25.02.2020	e.h.
Geprüft	KL	Presterl	25.02.2020	e.h.
Freigegeben	KL	Presterl	25.02.2020	e.h.

4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

4.1. Masken (Symbolfoto, in Aktualisierung)



Patienten: ohne Expirationsventil
Personal: mit Expirationsventil

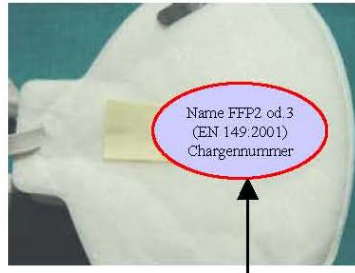

Produktionsspezifikation



Patient Personal

4.2. Anlegen der Schutzmaske (siehe auch KAV-Video „Hygienemaßnahmen“ von Februar 2020)



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

Mit den Fingerspitzen beider Hände den Metallbügel der Maske vom Nasenrücken abwärts zu den Wangen an die Konturen des Gesichts anmodellieren. Den Bügel nur zu quetschen sorgt nicht für einen sicheren und dichten Schutz der Maske!



Schritt 4

Kräftig **Ausatmen!** Ein positiver Druck in der Maske muss spürbar sein. Bei Feststellen einer undichten Stelle positionieren Sie die Maske erneut (Haltebänder etc.) **Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**



Schritt 5

Kräftig **Einatmen!** Wenn die Maske dicht sitzt wird sie an das Gesicht gepresst. Bei einem schlechten Sitz lässt dieser Anpressdruck sofort nach. **Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**

4.3. Maskenwechsel

- Bei Durchfeuchtung der Maske

Mund- Nasenschutzmasken (FFP2 und FFP3)

gültig ab: 25.2.2020

Version 03

Seite 3 von 3

- Nach Berührung mit kontaminierten Händen
- Bei sichtbarer Kontamination
- Nach Beenden der Tätigkeit und/oder Verlassen des Isolationszimmers

Schutzmasken sind **gezielt und ressourcenschonend** einzusetzen!

Bei Auftreten von Lieferengpässen sei auf die Stellungnahme des Robert-Koch-Instituts „Mögliche Maßnahmen zum Ressourcen-schonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zusammenhang mit der neuartigen Coronavirus-Erkrankung COVID-19“.

Die in dieser Stellungnahme beschriebenen Maßnahmen weisen eine erhöhte Kontaminationsgefahr und ein höheres Infektionsrisiko auf. Sie sind daher **ausdrücklich nur auf offiziell ausgerufene Notfallsituationen anzuwenden**, wenn FFP-Masken und oder MNS nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.

5 ÄNDERUNGEN

Datum	Version	Änderung
1.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
1.3.2010	02	Neues Layout
25.02.2020	03	Überarbeitung